

PRIME-DENT COMPOSITE CORE BUILD UP MATERIAL

COMPOSITE DE RECONSTITUTION DE FAUX MOIGNONS

AUTO POLYMERISABLE

MODE D'EMPLOI

- Sur dent dévitalisée : **PRIME-DENT COMPOSITE CORE BUILD UP MATERIAL** doit être utilisé de préférence avec un tenon radiculaire de type FILPOST ou autre.
- Sur dent vivante : **PRIME-DENT COMPOSITE CORE BUILD UP MATERIAL**, utiliser un fond de cavité de type FLUOROSEAL ou autre. La consolidation avec un tenon dentinaire de type FILPIN est aussi recommandée.

1 Préparation

Mettre en forme, nettoyer et rincer et sécher la surface à traiter.

2 MORDANCAGE

Appliquer du gel de mordantage à l'acide phosphorique à 38% sur l'émail, ETCHANT GEL est un gel sans silice qui ne laisse aucun résidu après rinçage.

Laisser agir durant 20 secondes.

3 RINCAGE et SECHAGE

Rincer abondamment durant 20 secondes.

Sécher avec un air sec et exempt d'huile.

Eviter le contact avec la salive ou le sang.

4 BONDING

Appliquer un liant amélo-dentinaire de votre choix, nous recommandons PRIME DENT ENAMEL/DENTIN RESIN BONDING

5 5-APPLICATION

A l'aide d'une spatule plastique, côté tête ronde, prélever la quantité désirée de catalyseur, avec le côté plat, prélever une quantité égale de base, refermer les boîtes. Mélanger pendant 20 secondes pour obtenir une pâte homogène. Pour modifier la rapidité de prise, augmenter ou diminuer la quantité de catalyseur.

Utiliser une matrice si nécessaire, mettre en place le composite et fouler en place.

Le temps de durcissement est de 6 minutes, ôter la matrice, tailler et finir.

Temps de mélange 20s / Temps de mise en place : 1 minute et 40s / Temps de durcissement 6 minutes

CONSERVATION

18 mois à température ambiante

36 mois entre 5 et 12°

PRESENTATION

2 x 14g de pâte et catalyseur, 2 blocs de spatulation, Spatule en plastiques, Mode d'emploi.

Réservé à l'usage Dentaire

CE 0510

AVERTISSEMENT:

Évitez le contact prolongé du produit non polymérisé avec la peau et la gencive. En cas de contact prolongé, lavez abondamment à l'eau.

Une sensibilité post-opératoire peut apparaître si le produit n'a été pas parfaitement polymérisé.

L'évaluation clinique n'a pas révélé de réactions post-opératoires.

Gel de mordantage : évitez le contact avec les yeux, la peau, les muqueuses et la gencive. En cas de contact, rincer abondamment, consulter un médecin en cas de contact avec les yeux.

GARANTIE ET LIMITATION DE LA RESPONSABILITE DE STARDENT

L'aide technique fournie par Stardent est destinée à aider les chirurgiens dentistes à mettre en œuvre le produit.

Cette aide n'étend pas la garantie et ne libère pas le chirurgien dentiste de la responsabilité de tester les produits distribués par Stardent afin de déterminer s'ils conviennent à des procédures et usages particuliers. Le dentiste accepte tous les risques et prend la responsabilité pour tout dommage pouvant résulter de l'utilisation incorrecte du produit.

En cas de vice du matériau, la responsabilité de Stardent est limitée au remplacement du produit défectueux. Pour que cette garantie limitée soit applicable, le produit défectueux doit être renvoyé à Stardent. En aucun cas, Stardent ne pourra être tenu responsable de dommages indirects, consécutifs ou accessoires.

Fabriqué par :
Prime Dental Manufacturing
3735 W. Belmont Ave
Chicago IL 60618
USA

Distribué par :
STARDENT
B.P. 16
31380 GRAGNAGUE
☎ 05 34 26 13 13
📠 05 34 26 13 33