

PRIME-DENT Composite Surface Sealant

Résine de scellement photopolymérisable pour les surfaces de composite

Prime-Dent Composite Surface Sealant est une résine photo polymérisable à basse viscosité utilisée pour sceller les surfaces des restaurations en composite.

INDICATIONS

Lors de la mise en forme des restaurations en composite, la taille et le polissage crée des micro-fissures et des irrégularités tant sur la surface que sur le joint marginal. Cette résine est résistante à l'usure et parfaitement adaptée à cet usage en renforçant l'intégrité du joint marginal. Ce produit est applicable sur les restaurations tant antérieures que postérieures.

MODE D'EMPLOI

1- Restaurations neuves :

Rincer et sécher parfaitement la surface de la restauration.

Mordancer la surface de la restauration en débordant de 2mm sur l'émail environnant.

Attendre 20 secondes puis rincer et sécher avec un air sec et exempt de traces d'huile et d'humidité.

Appliquer une fine couche sur toute la surface mordancée en faisant pénétrer le produit en insistant avec une brosette de type MICROBRUSH. Répartir en appliquant un léger souffle d'air avec la seringue et photo polymériser pendant 20 secondes.

Si vous le souhaitez un léger polissage est possible tant en précisant que le polissage n'est pas nécessaire.

2- Restaurations anciennes et scellement d'amalgames neufs ou existants :

Repolir soigneusement la surface .

Rincer et sécher parfaitement la surface de la restauration.

Mordancer la surface de la restauration en débordant de 2mm sur l'émail environnant.

Attendre 20 secondes puis rincer et sécher avec un air sec et exempt de traces d'huile et d'humidité.

Appliquer une fine couche sur toute la surface mordancée en faisant pénétrer le produit en insistant avec une brosette de type MICROBRUSH. Répartir en appliquant un léger souffle d'air avec la seringue et photo polymériser pendant 20 secondes.

Si vous le souhaitez un léger polissage est possible tant en précisant que le polissage n'est pas nécessaire.

CONSERVATION

De préférence tenir au frais et à l'abri de la lumière.

PRÉSENTATION : 1 flacon de 7 ml Mode d'emploi

Réservé à l'usage Dentaire

CE 0510

AVERTISSEMENT:

Évitez le contact prolongé du produit non polymérisé avec la peau et la gencive. En cas de contact prolongé, lavez abondamment à l'eau.

Une sensibilité post-opératoire peut apparaître si le produit n'a été pas parfaitement polymérisé.

L'évaluation clinique n'a pas révélé de réactions post-opératoires.

GARANTIE ET LIMITATION DE LA RESPONSABILITE DE STARDENT

L'aide technique fournie par Stardent est destinée à aider les chirurgiens dentistes à mettre en œuvre le produit.

Cette aide n'étend pas la garantie et ne libère pas le chirurgien dentiste de la responsabilité de tester les produits distribués par Stardent afin de déterminer s'ils conviennent à des procédures et usages particuliers. Le dentiste accepte tous les risques et prend la responsabilité pour tout dommage pouvant résulter de l'utilisation incorrecte du produit.

En cas de vice du matériau, la responsabilité de Stardent est limitée au remplacement du produit défectueux. Pour que cette garantie limitée soit applicable, le produit défectueux doit être renvoyé à Stardent. En aucun cas, Stardent ne pourra être tenu responsable de dommages indirects, consécutifs ou accessoires.

Fabriqué par :

Prime Dental Manufacturing
3735 W. Belmont Ave
Chicago IL 60618
USA

Distribué par :

STARDENT
B.P. 16
31380 MONTASTRUC
☎ 05 34 26 13 13
📠 05 34 26 13 33