

# PRIME-DENT Hema Desensitizer

## Liner anti-microbien et desensibilisateur

### COMPOSITION

HEMA ( Hydroxyéthyle de méthacrylate)

Chlorure de Benzalconium

### Mécanisme d'action et indications principales

1. En se combinant aux protéines contenues dans la dentine, la résine hydrophile HEMA contenue dans Hema Desensitizer évite une recolonisation bactérienne ultérieure et permet le scellement des tubulis.
2. Le chlorure de benzalconium détruit les germes présents dans les tubulis. Ces germes sont le plus souvent responsables des hypersensibilités post-opératoires. Dans les cas de collets sensibles, ces germes aggravent la sensation douloureuse.
3. Utilisé comme liner ( 80% des indications), PRIME-DENT Hema Desensitizer élimine dans la plupart des cas les sensibilités post-opératoires après obturation.
4. Utilisé comme desensibilisateur ( 20% des indications) PRIME-DENT Hema Desensitizer procure un effet antalgique immédiat au collet des dents. Le chlorure de benzalconium est le seul produit de sa classe pratiquement inoffensif pour le parodonte.
5. Après les séances de blanchiment ambulatoires et au fauteuil.
6. Après détartrage pour réduire la sensation de froid
7. Après curetage et chirurgie parodontale

### UTILISATION COMME LINER

Sous composite ou amalgame, éliminer le tissu carieux et préparer la cavité. En cas de cavité profonde, utiliser un fond de cavité de type Fluoroseal en regard de la pulpe.

Mordancer l'émail et la dentine

Appliquer PRIME-DENT Hema Desensitizer à l'aide d'un Multi-Brush ou d'une boulette de coton stérile imbibée en tamponnant fermement pour faire pénétrer le produit. Le produit peut s'appliquer sur une dentine légèrement humide.

Ne pas rincer.

Attendre 30s et sécher très légèrement

Appliquer une 2<sup>ème</sup> couche si besoin en suivant les mêmes indications

Appliquer votre adhésif habituel

### UTILISATION COMME DESENSIBILISEUR

Préparer le collet

Appliquer une couche de produit pendant 30 secondes avec une multi-brush en faisant pénétrer le produit en tamponnant fermement.

Laisser agir 30s et sécher légèrement.

Ne pas rincer

En cas de sensibilité persistante, recouvrir d'une couche de Prime-Dent Light Cure Bonding. Ce bonding a la consistance résineuse protégera efficacement le traitement.

### CONSERVATION

De préférence tenir au frais et à l'abri de la lumière.

PRESENTATION : 1 flacon de 7ml Mode d'emploi

*Réservé à l'usage Dentaire*

**CE 0510**

### AVERTISSEMENT:

Evitez le contact prolongé du produit avec la peau et la gencive. En cas de contact prolongé, lavez abondamment à l'eau.

### GARANTIE ET LIMITATION DE LA RESPONSABILITE DE STARDENT

L'aide technique fournie par Stardent est destinée à aider les chirurgiens dentistes à mettre en œuvre le produit.

Cette aide n'étend pas la garantie et ne libère pas le chirurgien dentiste de la responsabilité de tester les produits distribués par Stardent afin de déterminer s'ils conviennent à des procédures et usages particuliers. Le dentiste accepte tous les risques et prend la responsabilité pour tout dommage pouvant résulter de l'utilisation incorrecte du produit.

En cas de vice du matériau, la responsabilité de Stardent est limitée au remplacement du produit défectueux. Pour que cette garantie limitée soit applicable, le produit défectueux doit être renvoyé à Stardent. En aucun cas, Stardent ne pourra être tenu responsable de dommages indirects, consécutifs ou accessoires.

Fabriqué par :  
Prime Dental Manufacturing  
3735 W. Belmont Ave  
Chicago IL 60618  
USA

Distribué par :  
**STARDENT**  
B.P. 16  
31380 GRAGNAGUE  
☎ 05 34 26 13 13  
📠 05 34 26 13 33