

# **PRIME-DENT PIT AND FISSURE SEALANT**

## **COMPOSITE DE SCELLEMENT DES PUIITS ET FISSURES**

### **AUTO POLYMERISABLE**

#### **MODE D'EMPLOI**

La consistance très fluide du produit et sa grande affinité pour le tissu dentaire permet d'éviter les manques et d'obtenir une liaison du composite sur toute la surface à traiter.

#### **1- Préparation**

Mettre en forme les sillons et appliquer un traitement prophylactique approprié. Nettoyer, rincer et sécher la surface à traiter.

#### **2- MORDANCAGE**

Appliquer le gel de mordantage à l'acide phosphorique à 38% sur l'émail, de préférence avec PRIME DENT ETCHANT GEL SILICA FREE qui est un gel sans silice ne laissant aucun résidu après rinçage.

Appliquer le gel généreusement en débordant des limites de la cavité.

Laisser agir durant 1 minute.

#### **3- RINCAGE**

Rincer abondamment durant 15 secondes.

#### **4-SECHAGE**

Sécher jusqu'à obtenir une surface d'aspect crayeux avec un air sec et exempt d'huile. Eviter le contact avec la salive ou le sang.

#### **5-APPLICATION**

Verser une goutte de chaque flacon sur le bloc à spatuler et mélanger 10s. Appliquer directement à l'aide d'un applicateur en évitant de créer des bulles. Le durcissement est complet 1 mn après le mélange. Attendre 2mn et vérifier l'état de surface.

6-Si besoin, renouveler l'opération 5.

7-Nettoyer la surface traitée avec une boulette de coton et rincer abondamment.

#### **CONSERVATION**

18 mois à température ambiante

36 mois entre 5 et 12°

#### **PRESENTATION**

3 seringues de composite de 1.2ml

1 seringue de gel de mordantage de 1.2ml

Embout aiguilles

Mode d'emploi

*Réservé à l'usage Dentaire*

#### **CE 0510**

**AVERTISSEMENT:**

Évitez le contact prolongé du produit non polymérisé avec la peau et la gencive. En cas de contact prolongé, lavez abondamment à l'eau.

Une sensibilité post-opératoire peut apparaître si le produit n'a été pas parfaitement polymérisé.

L'évaluation clinique n'a pas révélé de réactions post-opératoires.

Gel de mordantage : évitez le contact avec les yeux, la peau, les muqueuses et la gencive. En cas de contact, rincer abondamment, consulter un médecin en cas de contact avec les yeux.

### **GARANTIE ET LIMITATION DE LA RESPONSABILITE DE DISMA DENTAIRE**

L'aide technique fournie par **STARDENT** est destinée à aider les chirurgiens dentistes à mettre en œuvre le produit.

Cette aide n'étend pas la garantie et ne libère pas le chirurgien dentiste de la responsabilité de tester les produits distribués par **STARDENT** afin de déterminer s'ils conviennent à des procédures et usages particuliers. Le dentiste accepte tous les risques et prend la responsabilité pour tout dommage pouvant résulter de l'utilisation incorrecte du produit.

En cas de vice du matériau, la responsabilité de **STARDENT** est limitée au remplacement du produit défectueux. Pour que cette garantie limitée soit applicable, le produit défectueux doit être renvoyé à **STARDENT**. En aucun cas, **STARDENT** ne pourra être tenu responsable de dommages indirects, consécutifs ou accessoires.

#### **Fabriqué par :**

PRIME DENTAL MANUFACTURING  
3735W. Belmont Avenue – Chicago,  
Illinois 60618  
USA

#### **Distribué par :**

**STARDENT**  
B.P. 16  
31380 MONTASTRUC  
Tél : 05 34 26 13 13  
Fax : 05 34 26 13 33  
[info@stardent.fr](mailto:info@stardent.fr)