

PRIME-DENT PIT AND FISSURE SEALANT COMPOSITE DE SCELLEMENT DES PUIITS ET FISSURES PHOTO POLYMERISABLE

MODE D'EMPLOI

La consistance très fluide du produit et sa grande affinité pour le tissu dentaire permet d'éviter les manques et d'obtenir une liaison du composite sur toute la surface à traiter.

1- Préparation

Mettre en forme les sillons et appliquer un traitement prophylactique approprié. Nettoyer, rincer et sécher la surface à traiter.

2- Mordançage

Appliquer le gel de mordançage à l'acide phosphorique à 38% sur l'émail, de préférence avec PRIME DENT ETCHANT GEL SILICA FREE qui est un gel sans silice ne laissant aucun résidu après rinçage.

Appliquer le gel généreusement en débordant des limites de la cavité.

Laisser agir durant 1 minute.

3- Rinçage

Rincer abondamment durant 15 secondes.

4- Séchage

Sécher jusqu'à obtenir une surface d'aspect crayeux avec un air sec et exempt d'huile.

Eviter le contact avec la salive ou le sang.

5- Application

Appliquer directement à l'aide de la seringue le composite de scellement sur la surface occlusale traitée et étaler avec un léger jet d'air (2 gouttes suffisent pour 1 quadrant) et photo polymériser 30 secondes

6-Renouveler l'opération 5.

7-Nettoyer la surface traitée avec une boulette de coton et rincer abondamment.

CONSERVATION

18 mois à température ambiante. 36 mois entre 5 et 12°.

PRESENTATION

3 seringues de composite de 1.2ml ; 1 seringue de gel de mordançage de 1.2ml ; Embout aiguilles ; Mode d'emploi

Réservé à l'usage Dentaire

CE 0510

AVERTISSEMENT:

Évitez le contact prolongé du produit non polymérisé avec la peau et la gencive. En cas de contact prolongé, lavez abondamment à l'eau.

Une sensibilité post-opératoire peut apparaître si le produit n'a été pas parfaitement polymérisé.

L'évaluation clinique n'a pas révélé de réactions post-opératoires.

Gel de mordançage : évitez le contact avec les yeux, la peau, les muqueuses et la gencive. En cas de contact, rincer abondamment, consulter un médecin en cas de contact avec les yeux.

GARANTIE ET LIMITATION DE LA RESPONSABILITE DE STARDENT

L'aide technique fournie par Stardent est destinée à aider les chirurgiens dentistes à mettre en œuvre le produit.

Cette aide n'étend pas la garantie et ne libère pas le chirurgien dentiste de la responsabilité de tester les produits distribués par Stardent afin de déterminer s'ils conviennent à des procédures et usages particuliers. Le dentiste accepte tous les risques et prend la responsabilité pour tout dommage pouvant résulter de l'utilisation incorrecte du produit.

En cas de vice du matériau, la responsabilité de Stardent est limitée au remplacement du produit défectueux. Pour que cette garantie limitée soit applicable, le produit défectueux doit être renvoyé à Stardent. En aucun cas, Stardent ne pourra être tenu responsable de dommages indirects, consécutifs ou accessoires.

Fabriqué par :

PRIME DENTAL MANUFACTURING
3735W. Belmont Avenue – Chicago,
Illinois 60618
USA

Distribué par :

STARDENT
B.P. 16
31380 MONTASTRUC
Tél : 05 34 26 13 13
Fax : 05 34 26 13 33