

# PRIME-DENT Plastic Bond Enhancer

**Apprêt pour surface composite ou résine monocomposant**

Prime-Dent Plastic Bond Enhancer est un silane utilisé pour renforcer l'adhésion de votre système de restauration sur les surfaces de composites, résines,.....

## INDICATIONS

A utiliser sur surface composite seulement.

## MODE D'EMPLOI

Apprêt pour surface composite, résine, monocomposant sans mélange ni dosage à utiliser après préparation de la surface.

### 1- Préparation de la surface

Dégraissier et travailler la surface avec une fraise afin d'obtenir une surface la plus rétentive possible. Un micro sablage peut également être réalisé. Rincer et sécher parfaitement la surface à traiter.

### 2-Application de Prime-Dent Plastic Bond Enhancer

Prélever ou déposer une goutte sur un bloc de mélange et appliquer une goutte de produit au pinceau ou "microbrush". Déposer uniformément et en faisant pénétrer une fine couche de produit sur toute la surface à traiter.

3- Appliquer un léger jet d'air à la seringue durant 10 secondes pour répartir le produit et favoriser l'évaporation du solvant et laisser sécher 30 secondes.

4-Procéder au scellement ou à la restauration avec votre technique habituelle, de préférence utiliser le bonding et le composite PRIME DENT ou le système de scellement Prime Dent. En cas de restauration, utiliser un composite opaqueur pour obtenir un résultat esthétique parfait.

## CONSERVATION

De préférence tenir au frais et à l'abri de la lumière.

## PRESENTATION

1 flacon de 10 ml

Mode d'emploi

*Réservé à l'usage Dentaire*

## CE 0510

### AVERTISSEMENT:

Evitez le contact prolongé du produit non polymérisé avec la peau et la gencive. En cas de contact prolongé, lavez abondamment à l'eau.

Une sensibilité post-opératoire peut apparaître si le produit n'a été pas parfaitement polymérisé.

L'évaluation clinique n'a pas révélé de réactions post-opératoires.

### GARANTIE ET LIMITATION DE LA RESPONSABILITE DE STARDENT

L'aide technique fournie par Stardent est destinée à aider les chirurgiens dentistes à mettre en œuvre le produit.

Cette aide n'étend pas la garantie et ne libère pas le chirurgien dentiste de la responsabilité de tester les produits distribués par Stardent afin de déterminer s'ils conviennent à des procédures et usages particuliers. Le dentiste accepte tous les risques et prend la responsabilité pour tout dommage pouvant résulter de l'utilisation incorrecte du produit.

En cas de vice du matériau, la responsabilité de Stardent est limitée au remplacement du produit défectueux. Pour que cette garantie limitée soit applicable, le produit défectueux doit être renvoyé à Stardent. En aucun cas, Stardent ne pourra être tenu responsable de dommages indirects, consécutifs ou accessoires.

### Fabriqué par :

Prime Dental Manufacturing  
3735 W. Belmont Ave  
Chicago IL 60618  
USA

### Distribué par :

**STARDENT**  
B.P. 16  
31380 MONTASTRUC  
☎ 05 34 26 13 13  
📠 05 34 26 13 33