

# PRIME-DENT Porcelain Bond Enhancer

**Apprêt pour surface en céramique monocomposant**

Prime-Dent Porcelain Bond Enhancer est un silane destiné à renforcer l'adhésion de votre système de restauration composite sur la céramique.

## INDICATIONS

A utiliser sur la céramique seulement.

## MODE D'EMPLOI

**Apprêt pour surface céramique monocomposant sans mélange ni dosage à utiliser sur surface céramique préparée à l'aide Prime-Dent Porcelain Etch.**

### 1- Préparation de la surface

Dégraisser et travailler la surface avec une fraise ou un micro sablage afin d'obtenir une surface la plus rétentive possible. Rincer et sécher parfaitement la surface à traiter.

### 2- Application de Prime-Dent Porcelain Bond Enhancer:

Prélever une goutte de produit et appliquer au pinceau de type Microbrush en faisant pénétrer le produit sur la surface.

3. Répartir le produit par l'application d'un léger jet d'air, laisser agir durant 30 secondes.

4. Procéder au scellement ou à la restauration avec votre technique habituelle, de préférence, utiliser les produits PRIME-DENT. En cas de restauration composite, utiliser un composite opaque pour un meilleur résultat esthétique.

## CONSERVATION

De préférence tenir au frais et à l'abri de la lumière.

**PRESENTATION** : 1 flacon de 10cc Mode d'emploi

*Réservé à l'usage Dentaire*

# CE 0510

## AVERTISSEMENT:

Evitez le contact prolongé du produit avec la peau et la gencive. En cas de contact prolongé, lavez abondamment à l'eau. L'évaluation clinique n'a pas révélé de réactions post-opératoires.

## GARANTIE ET LIMITATION DE LA RESPONSABILITE DE STARDENT

L'aide technique fournie par Stardent est destinée à aider les chirurgiens dentistes à mettre en œuvre le produit.

Cette aide n'étend pas la garantie et ne libère pas le chirurgien dentiste de la responsabilité de tester les produits distribués par Stardent afin de déterminer s'ils conviennent à des procédures et usages particuliers. Le dentiste accepte tous les risques et prend la responsabilité pour tout dommage pouvant résulter de l'utilisation incorrecte du produit.

En cas de vice du matériau, la responsabilité de Stardent est limitée au remplacement du produit défectueux. Pour que cette garantie limitée soit applicable, le produit défectueux doit être renvoyé à Stardent. En aucun cas, Stardent ne pourra être tenu responsable de dommages indirects, consécutifs ou accessoires.

**Fabriqué par :**

Prime Dental Manufacturing  
3735 W. Belmont Ave  
Chicago IL 60618  
USA

**Distribué par :**

**STARDENT**  
B.P. 16  
31380 MONTASTRUC  
☎ 05 34 26 13 13  
📠 05 34 26 13 33