

Prime-Dent Glass Ionomer Cement

Verre ionomère pour scellement

INTRODUCTION

PRIME-DENT Glass Ionomer Cement est un produit de la dernière génération de verre ionomère spécialement conçu pour la réalisation de scellement permanent de prothèse fixe.

PRIME-DENT Glass Ionomer Cement vous procurera une très forte adhésion.

PRIME-DENT Glass Ionomer Cement très peu soluble dans les fluides oraux.

TECHNIQUE DE MALAXAGE

Ratio: 1 cuiller de poudre pour 2 gouttes de liquide

Temps de spatulation: 20 à 30 secondes

Temps de travail : 4 minutes

Temps total de prise depuis le début de malaxage: +/- 10 minutes à 23°C

Il est recommandé de secouer le flacon de poudre pour l'aérer avant de prélever la poudre. Incorporer la poudre au liquide progressivement.

Pour extraire le liquide, renverser le flacon à la verticale au-dessus du bloc à spatuler et presser pour obtenir une goutte. Incorporer petit à petit la poudre au liquide tout en mélangeant.

Appliquer une couche régulière du mélange tant que le mélange présente un aspect brillant, mettre en place la prothèse et protéger durant 5 m des fluides oraux.

Repréparer une nouvelle quantité, si le mélange commence à durcir.

La consistance peut être modifiée sans influencer sur les caractéristiques du produit. En augmentant la quantité de liquide, vos scellements auront une faible épaisseur (12 à 20µ).

Pour augmenter le temps de travail, spatuler sur une plaque de verre refroidie au réfrigérateur.

PRECAUTION

Comme pour tout matériau adhésif, il est conseillé de nettoyer les instruments avant le durcissement du produit. Protéger les dents proximales du produit en appliquant de la vaseline.

La présence de fluor ou de trace d'huile peut inhiber le durcissement du produit.

Le produit contenant de l'acide polyacrylique, éviter le contact avec les yeux. En cas de contact, rincer les yeux à l'eau.

Les flacons doivent être bien refermés et conservés dans un endroit sec.

Réservé à l'usage Dentaire

GARANTIE ET LIMITATION DE LA RESPONSABILITE DE STARDENT

L'aide technique fournie par Stardent est destinée à aider les chirurgiens dentistes à mettre en œuvre le produit.

Cette aide n'étend pas la garantie et ne libère pas le chirurgien dentiste de la responsabilité de tester les produits distribués par Stardent afin de déterminer s'ils conviennent à des procédures et usages particuliers. Le dentiste accepte tous les risques et prend la responsabilité pour tout dommage pouvant résulter de l'utilisation incorrecte du produit.

En cas de vice du matériau, la responsabilité de Stardent est limitée au remplacement du produit défectueux. Pour que cette garantie limitée soit applicable, le produit défectueux doit être renvoyé à Stardent. En aucun cas, Stardent ne pourra être tenu responsable de dommages indirects, consécutifs ou accessoires.

CE0510

Fabricant:

PRIME-DENTAL MANUFACTURING

3735 W. Belmont Ave

Chicago, Il, 60618

USA

Distributeur pour la France:

STARDENT

B.P. 16

31380 MONTASTRUC

☎ 05 34 26 13 13

☎ 05 34 26 13 33