

# PRIME-DENT Non-Eugenol Temporary Cement

## CIMENT DE SCELLEMENT TEMPORAIRE EN AUTOMELANGE

### INTRODUCTION

**PRIME-DENT Non-Eugenol Temporary Cement** est un ciment temporaire universel à utiliser particulièrement avec une reconstitution à la résine ou au verre ionomère.

Il ne contient pas d'eugénol et sa formulation est auto polymérisable.

Le scellement est efficace en restant facile à déposer.

Le nouveau système auto mélange permet un mélange homogène, rapide et sans bulles. Le mélange est appliqué directement dans la pièce prothétique évitant ainsi les taches fastidieuses de dosage imprécis, de tubes à reboucher, de spatulation et de nettoyage des instruments.

**PRIME-DENT Non-Eugenol Temporary Cement** reste souple pour permettre une dépose aisée. Il a été testé pour ne présenter aucun effet indésirable sur les liants des composites.

Après usage, retirer l'embout mélangeur et replacer la capsule de la cartouche.

### PROTOCOLE

- 1) Pour prévenir un développement bactérien, rincer avec un produit à base de chlorhexidine avant le placement. Sécher.
- 2) Retirer le bouchon de la seringue automix et placer l'embout mélangeur en le verrouillant par ¼ de tour. Ne pas réutiliser l'embout mélangeur.
- 3) Pousser le piston de la seringue doucement jusqu'à ce que le flux de la base et celui du catalyseur soient identiques afin d'assurer un mélange optimal (ceci pour la première utilisation de la cartouche).
- 4) Appliquer une fine couche à l'intérieur de la couronne et mettre en place la prothèse, temps de travail 90s.
- 5) Eliminer les excès après 1 mn
- 6) Après 2,5mn suivant la mise en place de la prothèse, le scellement est terminé.

**Note :** Si le mélange continue à couler du pistolet après utilisation, tirer le piston du pistolet vers l'arrière pour annuler la pression.

### PRECAUTION

Comme pour tout matériau adhésif, il est conseillé de nettoyer les instruments avant le durcissement du produit.

La présence de fluor ou de trace d'huile peut inhiber le durcissement du produit.

Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact, rincer les yeux à l'eau.

Evitez le contact prolongé du produit non polymérisé avec la peau et la gencive. En cas de contact prolongé, lavez abondamment à l'eau.

Une sensibilité post-opératoire peut apparaître si le produit n'a été pas parfaitement polymérisé.

L'évaluation clinique n'a pas révélé de réactions post-opératoires.

La seringue doit être bien refermée et conservée dans un endroit sec et tempéré ( 22°C).

### GARANTIE ET LIMITATION DE LA RESPONSABILITE DE STARDENT

L'aide technique fournie par Stardent est destinée à aider les chirurgiens dentistes à mettre en œuvre le produit.

Cette aide n'étend pas la garantie et ne libère pas le chirurgien dentiste de la responsabilité de tester les produits distribués par Stardent afin de déterminer s'ils conviennent à des procédures et usages particuliers. Le dentiste accepte tous les risques et prend la responsabilité pour tout dommage pouvant résulter de l'utilisation incorrecte du produit.

En cas de vice du matériau, la responsabilité de Stardent est limitée au remplacement du produit défectueux. Pour que cette garantie limitée soit applicable, le produit défectueux doit être renvoyé à Stardent. En aucun cas, Stardent ne pourra être tenu responsable de dommages indirects, consécutifs ou accessoires.

Réservé à l'usage Dentaire

#### CE0510

#### Fabricant:

PRIME-DENTAL MANUFACTURING

3735 W.Belmont Ave

Chicago, Il, 60618

USA

#### Distributeur pour la France:

**STARDENT**

B.P.16

31380 MONTASTRUC

☎ 05 34 26 13 13

📠 05 34 26 13 33